

Flexmort CuddleCot™

Uvedení do provozu



Nejdříve ze všeho se ujistěte, že máte k dispozici vše, co je třeba:

- Shnuggle™ snadno omyvatelný košík se stojanem, měkkou matrací a krycí sítí
- Chladicí jednotku CuddleCot™
- Dvě měkké chladicí podložky; jednu standardní pro děti narozené v termínu a jednu malou pro děti narozené předčasně
- 90cm hadici
- Izolační podložku potaženou termoreflexní fólií
- Lahvičku biocidního přípravku
- Vypouštěcí klíč
- Návod k použití

- Shnuggle™ snadno omyvatelný košík se stojanem, měkkou matrací a krycí sítí
- Chladicí jednotku CuddleCot™
- Dvě měkké chladicí podložky; jednu standardní pro děti narozené v termínu a jednu malou pro děti narozené předčasně
- 90cm hadici
- Izolační podložku potaženou termoreflexní fólií
- Lahvičku biocidního přípravku
- Vypouštěcí klíč
- Návod k použití

Izolační podložku položte na matraci.



Na izolační vrstvu pak umístěte chladicí podložku.




Poté natáhněte krycí síť – pokud jste si ji pořídili.



Spojte hadice způsobem naznačeným na fotografii – zapadnou do sebe, což je provázeno slyšitelným cvaknutím.



Druhý konec zapojte do chladicí jednotky – opět uslyšíte zřetelné cvaknutí.

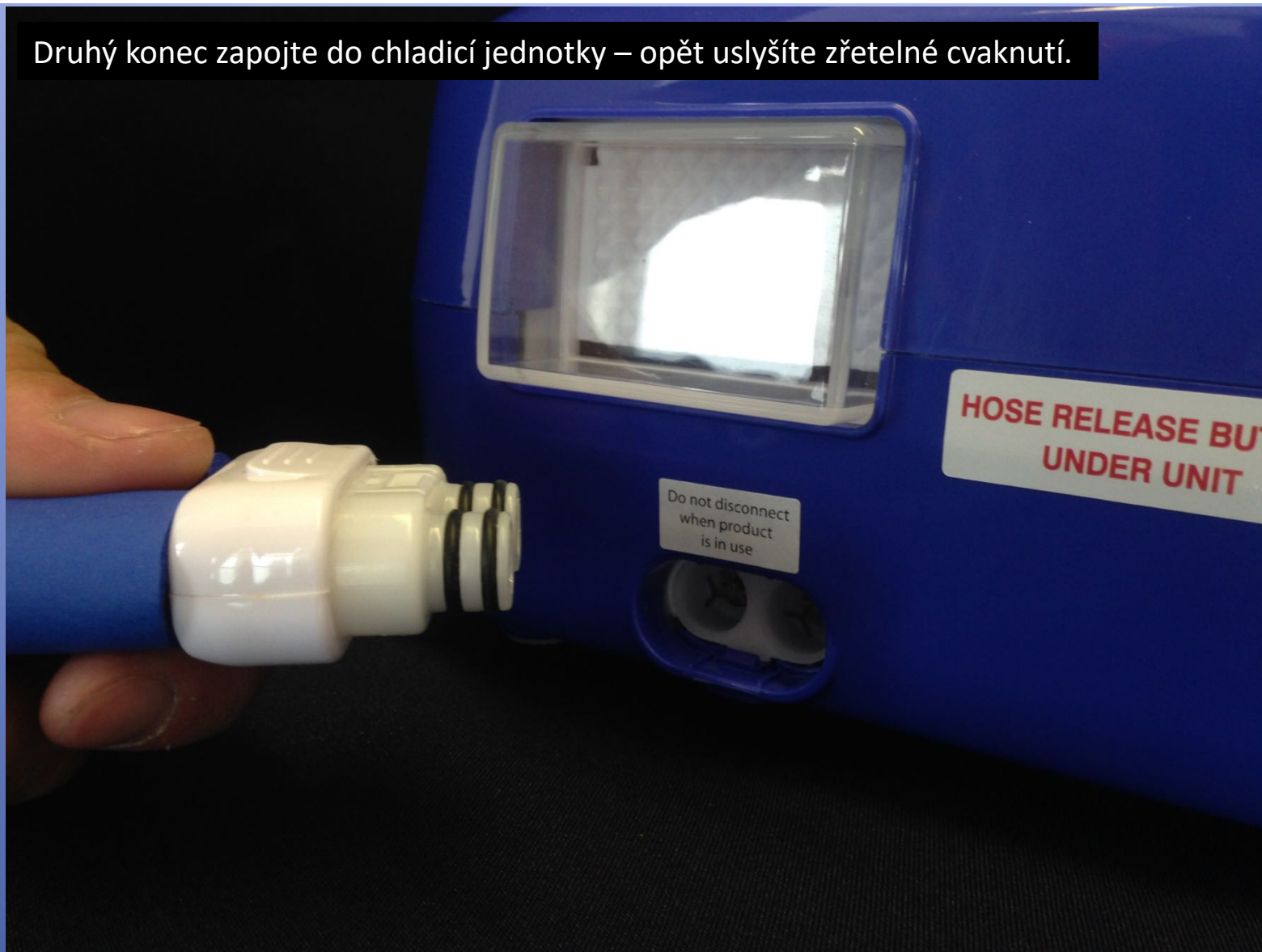

Jednotku zapněte a zvolte teplotní stupnici °C nebo °F.





Displej chladicí jednotky CuddleCot™ bude při zapnutí ukazovat teplotu, která zhruba odpovídá teplotě okolního prostředí.



CuddleCot bude třeba naplnit vodou, což je indikováno blikajícím symbolem modré kapky. Používejte pouze přečištěnou vodu, například vodu destilovanou.



Odšroubujte uzávěr plnicího hrdla.



Při každém plnění chladicí jednotky přidejte dvě kapky biocidního roztoku.



Výšku vodní hladiny uvidíte v průzoru nádržky, během plnění chladicí podložky hladina poklesne. Jakmile hladina dosáhne úrovně $\frac{1}{3}$ – $\frac{2}{3}$ výšky průzoru, přestaňte dolévat.



Mačkejte tlačítko se symbolem šipky směřující dolů, dokud se na displeji neobjeví hodnota 8°C nebo 46°F, poté stiskněte tlačítko "Enter".
CuddleCot vychladí podložku na cca 10°C (50°F).





V tuto chvíli je CuddleCot™
zcela připraven k použití.



Často dostáváme otázku, kolik času mohou při použití CuddleCot rodiče s tělíčkem svého dítěte strávit. Většina rodin v nemocnicích využívá CuddleCot po dobu 1-3 dnů, ale víme o rodičích, kteří v hospicích nebo v domácím prostředí využívali CuddleCot i po dobu 3 týdnů.




Tělíčko by mělo spočívat na chladicí podložce; může být oblečené nebo zabalené v zavinovačce a mělo by být zároveň přikryté dekou – zvyšuje se tím účinnost chladicího procesu.




Jakmile už CuddleCot není zapotřebí, chladič jednotku vypněte.




Hadice rozpojíte stlačením modrých západek.

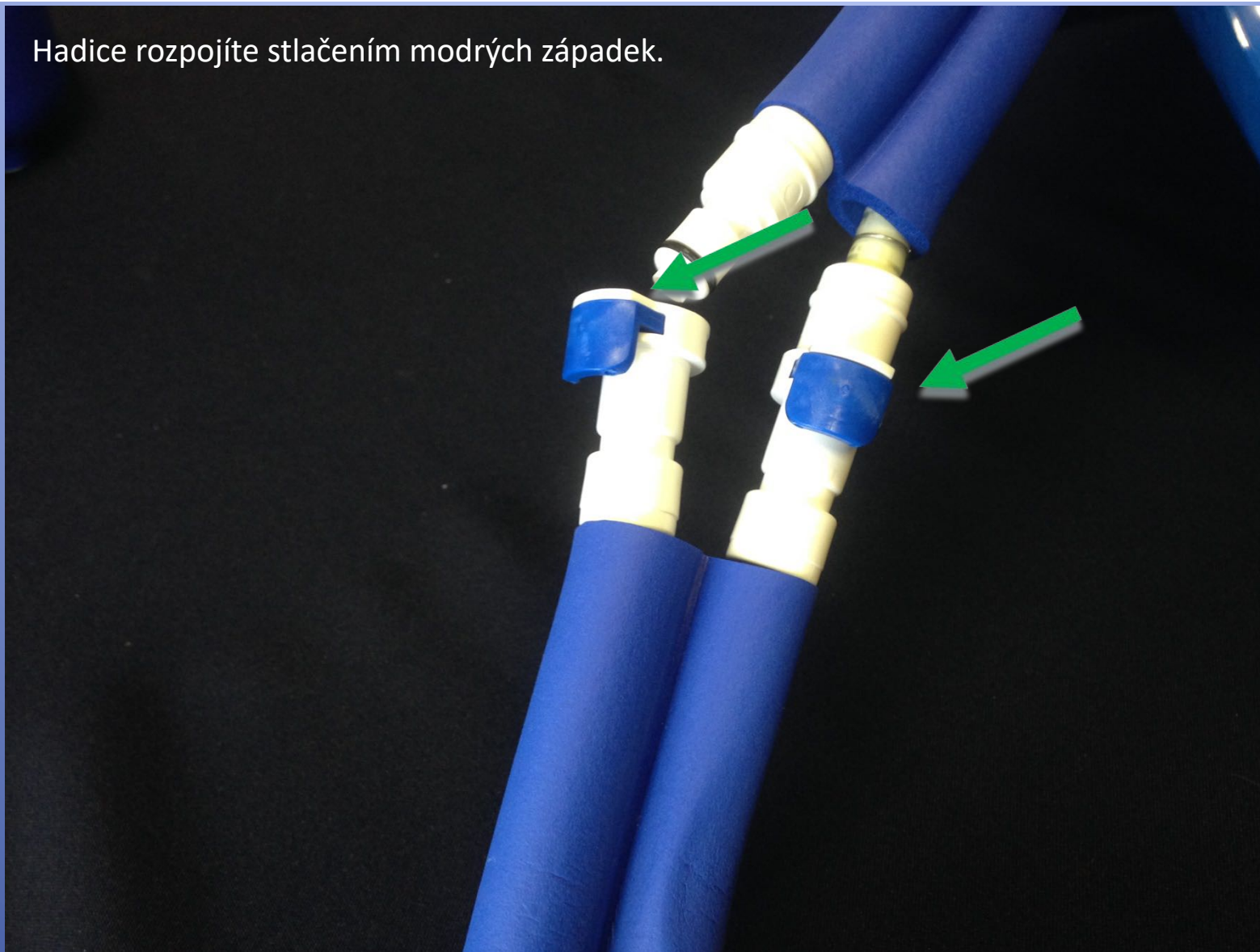

Při odpojování hadic z chladicí jednotky je důležité nejdříve stisknout uvolňovací tlačítko umístěné naspodu přístroje – tlačítko držte zmáčkuté a hadici jemným tahem vysuňte. Vytažením hadice bez použití uvolňovacího tlačítka byste zařízení poškodili!

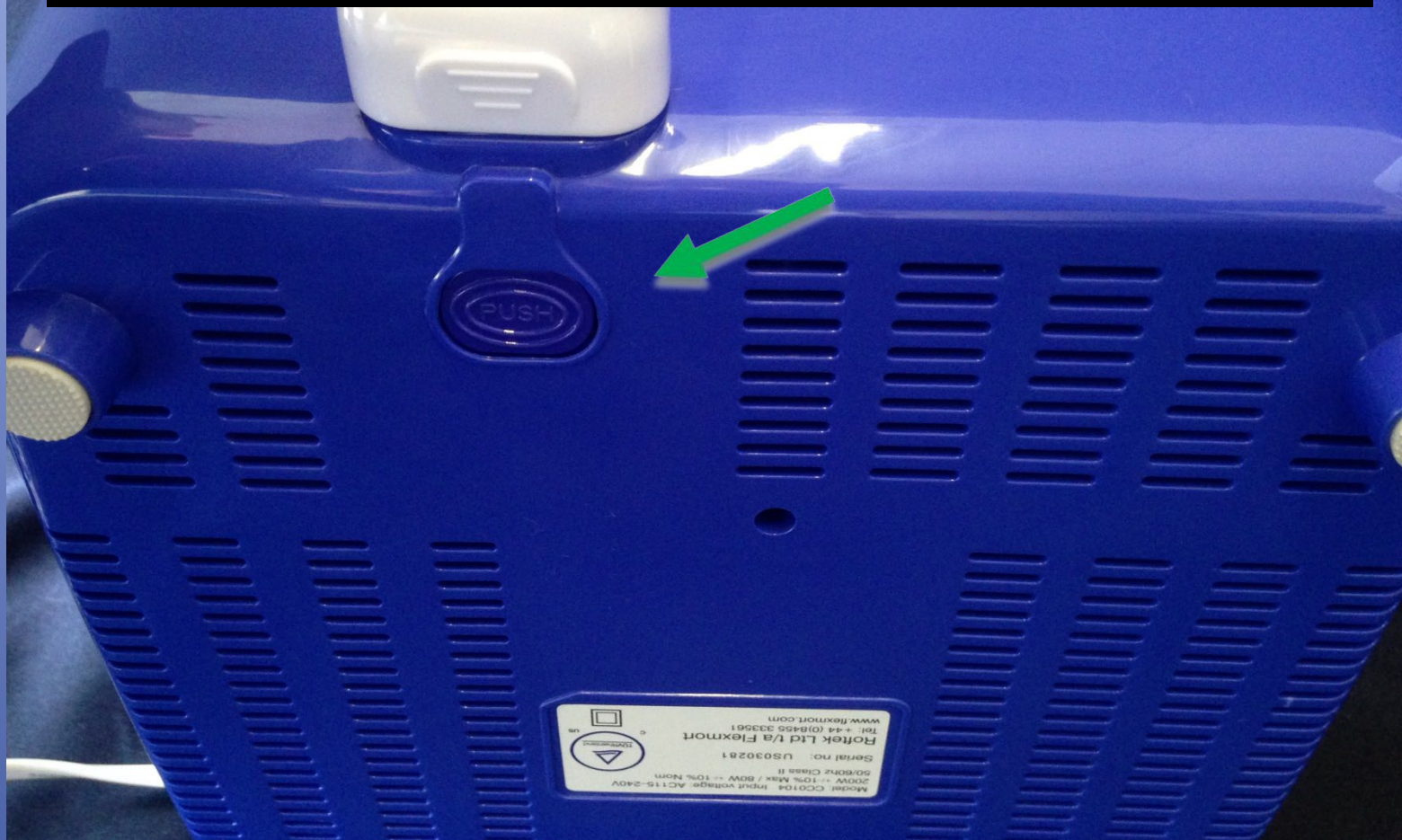


Pomocí vypouštěcího klíče z jednotky vypustíte vodu.

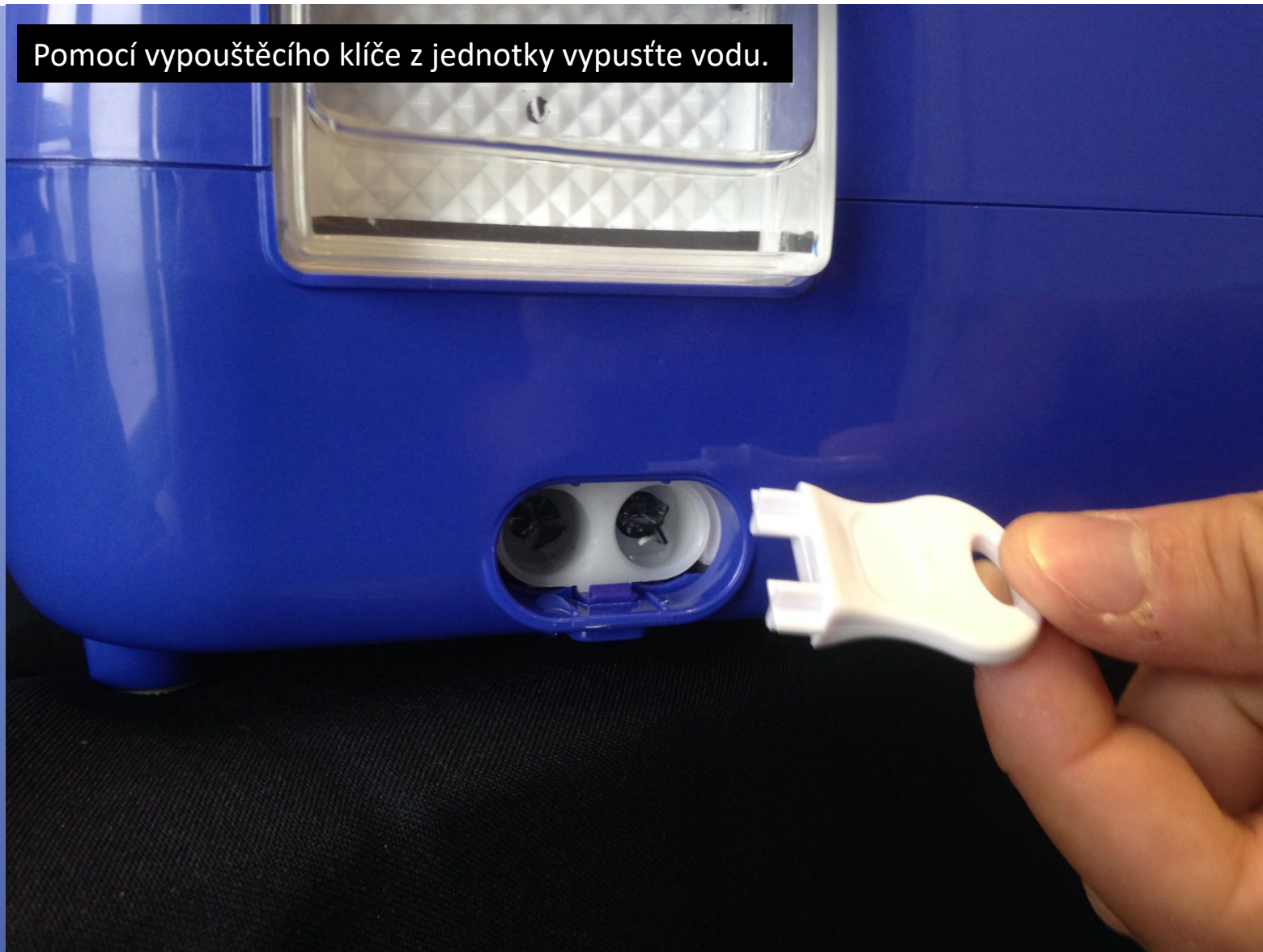

Čištění a desinfekce zařízení Flexmort CuddleCot™



CuddleCot je možné ošetřovat jakýmkoli standardním desinfekčním prostředkem určeným pro plastové povrchy.

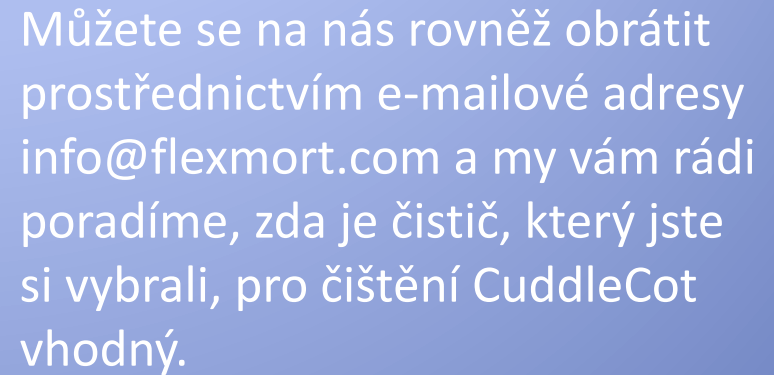



Krycí síť i návlek na matraci je možné prát.

Krycí síť při teplotě 30° C / 86°F,
návlek na matraci při teplotě 60° C / 140°F



Použití krycí sítě ani matrace není
nutné, je-li pro vás snazší vystlat dno
košíku například dečkou nebo
přikrývkou.

Flexmort CuddleCot™ Řešení problémů

Co dělat, když
Flexmort CuddleCot™
nechladí

Nejprve zkontrolujte, zda kryt ventilátoru není zanesen prachem – to může výkon chladicí jednotky snižovat.





System také může být
zavzdušněn



Při **zapnutém** zařízení
vyšroubujte plnicí zátku.

Chladicí podložku vyjměte z košíku.

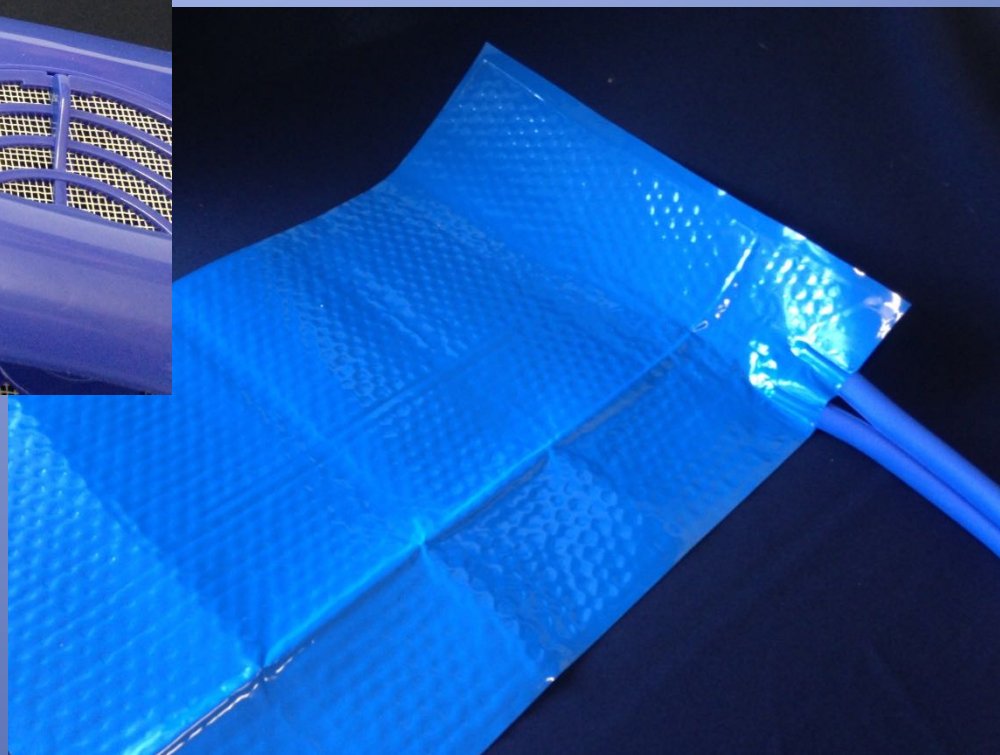

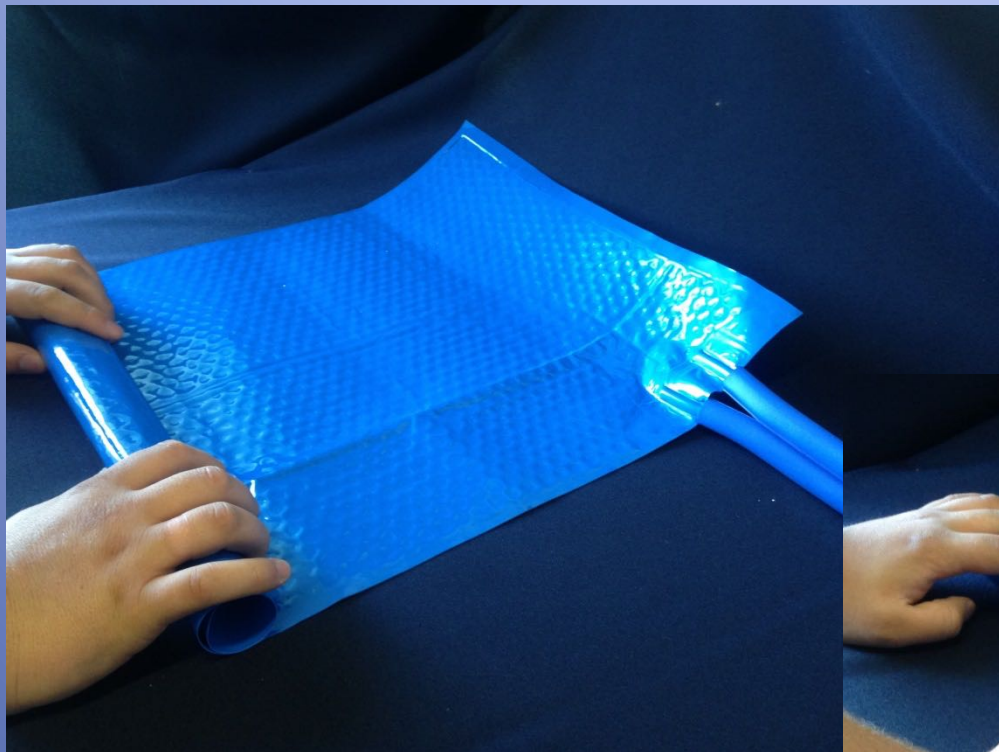

Chladicí podložku srolujte způsobem
Naznačeným na snímku – rolujte
směrem k hadici. Vytlačování tekutiny
může zvýšit hladinu viditelnou v průzoru
nádržky; jde o normální jev.



Poté podložku zase rozviňte – je možné,
že celý postup bude nutno několikrát
zopakovat. Pokud se vzduchovou bublinu
podařilo odstranit, teplota během
několika minut poklesne.

CuddleCot ale stále
nechladí!



Jestliže teplota stále neklesá, CuddleCot pomocí vypouštěcího klíče vyprázdňte a jednotku za chodu znovu napusťte. Tento postup by vám měl pomoci i v případě úporného zavzdušnění.

Pokud z chladicí jednotky uniká tekutina, zkontrolujte, zda není poškozeno uvolňovací tlačítko.



Potřebujete-li další
informace nebo asistenci,
kontaktujte nás na e-mailu
info@flexmort.com
nebo na telefonu
+44 (0)8455 333561